

Wskazówki dotyczące stosowania

Uważne przeczytanie poniższych informacji
umożliwia właściwe zastosowanie preparatu HYLO®-GEL

HYLO®-GEL Hialuronian sodu 2 mg/ml

Sterylnie krople oczne bez zawartości fosforanów i środków konserwujących.

Preparat przeznaczony do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystąpienia silnego, a także przewlekłego odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

Czym jest HYLO®-GEL?

HYLO®-GEL jest sterylnym roztworem kropli ocznych zawierającym 2 mg/ml hialuronianu sodu, bufor cytrynianowy, sorbitol oraz wodę.

Preparat nie zawiera fosforanów i środków konserwujących.

W jakim celu stosuje się HYLO®-GEL?

Preparat przeznaczony jest do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystąpienia silnego, a także przewlekłego odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

Kiedy należy stosować HYLO®-GEL?

HYLO®-GEL zawiera hialuronian sodu, naturalną substancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu człowieka. Hialuronian sodu wykazuje szczególne fizyczne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się i trudno zmywalnego filmu. Dzięki tym właściwościom bioprzylegania i zdolności dobrego mieszania się z naturalnymi łzami, powstają bardzo dobre warunki nawilżania rogówki i spojówek, a mruganie powiekami staje się ułatwione.

HYLO®-GEL zawiera wysokie stężenie kwasu hialuronowego, przez co charakteryzuje się dużą lepkością. Po zakropleniu oko jest szczególnie intensywnie i długo nawilżane.

Uporczywe lub silne dolegliwości ulegają zmniejszeniu, a oko jest długotrwale chronione przed podrażnieniami.

Regeneracja struktur powierzchniowych oka wymaga ciągłego, optymalnego nawilżania, aby fizjologiczne procesy gojenia mogły przebiegać prawidłowo.


HYLO®-GEL nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Ponadto nie zawiera również fosforanów, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.

W jaki sposób zakraplać HYLO®-GEL?



Rys. 1:


Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.

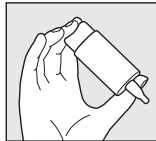

Rys. 2:

Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

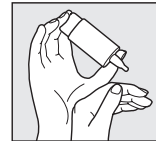

Rys. 3:

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę COMOD® na drugiej ręce.


URSAPHARM

32.2517 CCB

Produkt: PB HYLO-GEL 10 ML PL
Art.-Nr.: 32.2517
Format: 185 x 275 mm (Plano)


Materiał: Offset 60 g (UPM Fine, Fa. Nordland)
Farben: schwarz (1/1-fbg.)
Code: 1266

1. Ausfertigung vom 09.07.11

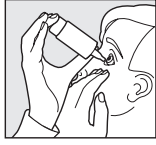

Rys. 4:

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania **jednej** kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, **niezależnie od siły nacisku na denko**. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprzowanie roztworu po powierzchni oczu.

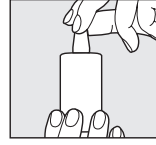

Rys. 5:

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Dzięki systemowi COMOD® z butelki o pojemności 10 ml pobiera się około 300 kropli.

Po zużyciu całego opakowania, na dnie butelki pozostaje, ze względów technicznych, niewielka ilość roztworu ponad gwarantowaną pojemność 10 ml.

HYLO®-GEL może być stosowany długotrwale.

Opakowanie powinno być używane zawsze tylko przez jedną osobę.

Jakie inne wskazówki dotyczące stosowania powinny być przestrzegane?

W przypadku stosowania innych kropli ocznych należy zachować co najmniej 30 minutowy odstęp. W takim przypadku HYLO®-GEL powinien być zakroplony jako ostatni. Maści do oczu należy stosować zawsze po podaniu HYLO®-GEL.

HYLO®-GEL jest szczególnie dobrze tolerowany także przy długotrwałym stosowaniu, ponieważ nie zawiera środka konserwującego.

W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach informowano o wystąpieniu nadwrażliwości (pieczenie, łzawienie oczu), które ustępowały po odstawieniu preparatu.

Można stosować łącznie ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.

Jak często i jak długo powinno się stosować HYLO®-GEL?

HYLO®-GEL należy dawkować indywidualnie, według uznania lub zalecenia lekarza okulisty. Zwykle zakrapla się 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. Przy silniejszych dolegliwościach HYLO®-GEL może być stosowany częściej. W przypadku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu. HYLO®-GEL przeznaczony jest do ciągłego stosowania. Przy utrzymujących się przez długi czas dolegliwościach, (tak jak ma to miejsce w przypadku każdej innej choroby), należy zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Kiedy nie należy stosować HYLO®-GEL?

HYLO®-GEL nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Jakich wskazówek dotyczących przechowywania HYLO®-GEL należy przestrzegać?

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Po otwarciu opakowania bezpośredniego można stosować przez okres 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności (☞).

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dostępne opakowanie

10 ml krople do oczu

Data przygotowania ulotki

Styczeń 2011

Producent (☞)

URSAPHARM
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Niemcy



STERILE A

32.2517 CCB

Produkt: PB HYLO-GEL 10 ML PL
Art.-Nr.: 32.2517
Format: 185 x 275 mm (Plano)

Materiał: Offset 60 g (UPM Fine, Fa. Nordland)
Farben: schwarz (1/1-fbg.)
Code: 1266

1. Ausfertigung vom 09.07.11