

Wskazówki dotyczące stosowania

Proszę zapoznać się dokładnie z poniższymi wskazówkami, które pomogą właściwie zastosować HYLO-PARIN®

HYLO-PARIN®

Hialuronian sodu i heparynian sodu

Do nawilżania i pielęgnacji rogówki i spojówek w przypadku podrażnień oczu połączonych z zaczerwienieniem, pieczeniem i swędzeniem.

Sterylny krople do oczu bez zawartości konserwantów i fosforanów.

Czym jest HYLO-PARIN®?

HYLO-PARIN® jest sterylnym roztworem bez środków konserwujących, zawierającym 1 mg/ml hialuronianu sodu, 1300 j.m./ml heparynianu sodu (uzyskanego z błony śluzowej jelita świńskiego), glicerol, bufor cytrynianowy oraz wodę.

W jakim celu stosuje się HYLO-PARIN®?

HYLO-PARIN® nawilża i pielęgnuje rogówkę i spojówki, uwalniając oczy od podrażnień wywołanych negatywnym wpływem otaczającego środowiska. Dzięki zastosowaniu HYLO-PARIN®, objawy takie jak: zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie oczu ulegają wyraźnemu zmniejszeniu.

Kiedy należy stosować HYLO-PARIN®?

Piekące, swędzące, łzawiące oczy, poczucie obecności piasku pod powiekami, oczy suche, to objawy oczu podrażnionych. Objawy te skłaniają nas często do tarcia oczu, jednak dolegliwości pozostają, ponieważ oczy są zbyt słabo nawilżone.

Powierzchnia zdrowego oka pokryta jest gładkim, równomiernym filmem łzowym, zmywającym kurz i cząsteczki brudu, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie struktur oka.

Pewne okoliczności i sytuacje, takie jak: przebywanie w klimatyzowanych lub zakurzonych pomieszczeniach, intensywna praca przed monitorem komputera lub oglądanie telewizji, obciążają dodatkowo oczy i pogarszają jakość łez.


Wraz z wiekiem zmniejsza się także wytwarzanie łez.

HYLO-PARIN® zawiera hialuronian sodu, naturalną substancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu człowieka. Wykazuje on szczególne fizyczne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się i trudno zmywalnego filmu. Te szczególne właściwości bioprzylegania są wspomagane przez heparynę. Heparyna jest także fizjologiczną substancją zbliżoną swą chemiczną strukturą do hialuronianu sodu.

Hialuronian sodu i heparyna pielęgnują rogówkę i spojówki oraz nawilżają razem z naturalnymi łzami powierzchnię oka, które chronione jest w ten sposób przed podrażnieniami pochodzącymi z otaczającego środowiska.


HYLO-PARIN® nie zawiera konserwantów, w jego składzie występują fizjologiczne substancje i dlatego jest zwykle dobrze tolerowany.

W jaki sposób zakraplać HYLO-PARIN®?

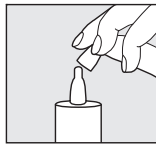

Rys. 1:


Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.

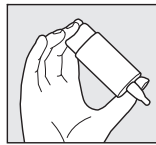

Rys. 2:

Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

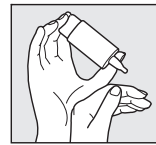

Rys. 3:

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę COMOD® na drugiej ręce.


 **URSAPHARM**

Produkt: PB HYLO-PARIN 10 ML PL
Art.-Nr.: 32.2524
Format: 185 x 275 mm (Plano)

Materiał: Offset 60 g (UPM Fine, Fa. Nordland)
Farben: Schwarz (1/1-fbg.)
Code: 1270


3. Ausfertigung vom 27.05.11

32.2524 CDA

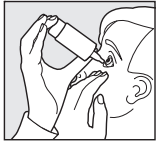

Rys. 4:

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania **jednej** kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, **niezależnie od siły nacisku na denko**. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu.

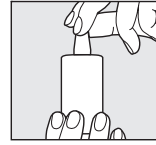

Rys. 5:

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.

Dzięki systemowi COMOD® z butelki o pojemności 10 ml pobiera się około 300 kropli.

Po zużyciu całego opakowania, na dnie butelki pozostaje, ze względów technicznych, niewielka ilość roztworu ponad gwarantowaną pojemność 10 ml.

HYLO-PARIN® może być stosowany długotrwale.

Opakowanie powinno być używane zawsze tylko przez jedną osobę.

Jakie inne wskazówki dotyczące stosowania powinny być przestrzegane?

W przypadku stosowania innych kropli ocznych należy zachować co najmniej 30-minutowy odstęp. W takim przypadku HYLO-PARIN® powinien być zakroplony jako ostatni. Maści do oczu należy stosować zawsze po podaniu HYLO-PARIN®.

HYLO-PARIN® jest szczególnie dobrze tolerowany także przy długotrwałym stosowaniu, ponieważ nie zawiera środka konserwującego.

W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach informowano o wystąpieniu nadwrażliwości (pieczenie, łzawienie oczu), które ustępowały po odstawieniu preparatu.

Można stosować łącznie ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.

Opierając się na obecnym stanie wiedzy można stwierdzić, że HYLO-PARIN® może być stosowany zarówno u dzieci, kobiet w ciąży jak i kobiet karmiących piersią.

W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania kropli ocznych zawierających gentamycynę, należy przestrzegać odstępu co najmniej jednogodzinnego między zastosowaniem obu preparatów, z uwagi na fakt, że gentamycyna podana jednocześnie z heparyną może powodować powstawanie osadów w worku spojówkowym.

Jak często i jak długo powinno się stosować HYLO-PARIN®?

HYLO-PARIN® należy dawkować indywidualnie według uznania lub zalecenia lekarza okulisty. Zwykle zakrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka. Przy silniejszych dolegliwościach HYLO-PARIN® może być stosowany częściej. W przypadku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu. HYLO-PARIN® przeznaczony jest do ciągłego stosowania. Przy utrzymujących się przez długi czas dolegliwościach (tak jak to ma miejsce w przypadku każdej innej choroby), należy zasięgnąć porady lekarza.

HYLO-PARIN® może być stosowany podczas używania twardych i miękkich soczewek kontaktowych.

Kiedy nie należy stosować HYLO-PARIN®?

HYLO-PARIN® nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Jakich wskazówek dotyczących przechowywania HYLO-PARIN® należy przestrzegać?

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Po otwarciu opakowania bezpośredniego można stosować przez okres 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności (☞).

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dostępne opakowanie

10 ml krople do oczu

Data przygotowania ulotki

Sierpień 2011



Producent (☞):

URSAPHARM
Industriestraße
66129 Saarbrücken
Niemcy



0344



32.2524 CDA

Produkt: PB HYLO-PARIN 10 ML PL
Art.-Nr.: 32.2524
Format: 185 x 275 mm (Plano)

Materiał: Offset 60 g (UPM Fine, Fa. Nordland)
Farben: Schwarz (1/1-fbg.)
Code: 1270

3. Ausfertigung vom 27.05.11